

Waar kan ik Femidom kopen?

Online

- [www.direct-help.nl/nl/verzorging-voor-de-vrouw/anti-conceptie-speciaal-voor-de-vrouw/\(Trophax\)](http://www.direct-help.nl/nl/verzorging-voor-de-vrouw/anti-conceptie-speciaal-voor-de-vrouw/(Trophax))
- www.condomerie.com/condooms/kenmerken/female-condoms/fc2-female-condom-femidom.html (De Condomerie)

In de winkel

Condomerie, Warmoesstraat 141, Amsterdam



www.fc2femalecondom.com | info@fc2femalecondom.com

f @FemaleCondomFC2
t @FC2FemaleCondom
y FC2FemaleCondom

FC2 vrouwencondoom wordt gemaakt door The Female Health Company (FHC).
Chicago USA/London UK/Malaysia



**Het FC2 vrouwencondoom
Femidom: voor fijne veilige sex**

Het FC2 vrouwencondoom Femidom voorkomt

- **Ongewenste zwangerschappen**
- **Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (soa's), waaronder hiv en aids**

Het FC2 vrouwencondoom Femidom is een veilige en betrouwbare anticonceptiemethode. Het beschermt ook tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), waaronder hiv.



Wat is het FC2 vrouwencondoom Femidom?

Het FC2 vrouwencondoom Femidom is een zacht, glad condoom. Het is makkelijk in de vagina in te brengen. Femidom heeft een binnenste en een buitenste ring die het op z'n plek houden tijdens seks. Femidom zit perfect. Het bedekt de wanden van de vagina, waardoor de penis vrij kan bewegen in het condoom tijdens de seks, terwijl het op silicone gebaseerde glijmiddel een natuurlijk gevoel geeft.

Geniet

Mannen en vrouwen genieten allebei van seks met het FC2 vrouwencondoom Femidom. Femidom heeft vele voordelen:

- Het materiaal is zacht en glad.
- Het voelt natuurlijk aan omdat het snel opwarmt tot lichaamstemperatuur.
- Het FC2 vrouwencondoom zit niet strak om de penis en geeft de man een natuurlijk gevoel.
- Femidom kan een aantal uur of direct voor seks ingedaan worden.
- Femidom kan gebruikt worden door mensen die allergisch zijn voor latex.
- Het is gemaakt van nitrile, een synthetisch materiaal.
- Je hoeft niet naar de dokter voordat je begint met het gebruiken van vrouwencondooms.
- Femidom heeft geen invloed op je lichaam en het bevat geen hormonen..

Veilig

Net zoals het mannencondoom blokkeert het FC2 vrouwencondoom Femidom sperma en de bacteriën of virussen die soa's veroorzaken. De buitenste ring biedt extra bescherming tegen soa's omdat het de schaamlippen van de vrouw en het begin van de penis bedekt. Femidom is voor eenmalig gebruik.



Noa:

Ik heb totale controle. Geen risico op zwangerschap. Geen risico op soa's. Geen problemen met vriendjes die weigeren een condoom om te doen. Het vrouwencondoom is mijn eerste keus voor veilig vrijen!

Jonathan:

Na problemen te hebben gehad met mannencondooms, ben ik heel blij dat mijn vriendin en ik zijn geswitcht naar Femidom vrouwencondooms. Het voelt alsof er helemaal geen condoom is. Seks is weer geweldig!



Zawadi:

Het is fantastisch dat ik Femidom kan gebruiken zonder dat ik daarvoor naar de dokter hoef. In het begin heb ik in mijn eentje geoefend het condoom in te doen. Het was makkelijker dan ik verwachtte. Nu voel ik me helemaal op mijn gemak het met mijn vriendje te gebruiken.