



Cómo utilizar el condón femenino FC2




¿Por qué deberíamos utilizar el FC2?

Existen muchas razones agradables y excitantes para usar el FC2. Aquí te presentamos algunas de ellas:


- El FC2 es un método de doble protección, es decir que protege tanto contra un embarazo no planificados como contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH.
- El FC2 permite que las mujeres y los hombres tengan relaciones sexuales relajadas y sin miedo a consecuencias negativas.
- El FC2 se puede insertar antes de iniciar las relaciones sexuales, con lo cual no es necesario interrumpir la espontaneidad sexual para ponerse un condón.
- El FC2 se adapta perfectamente a la vagina y permite que el pene se mueva libremente dentro del condón durante las relaciones sexuales.
- El FC2 se calienta rápido hasta alcanzar la temperatura corporal, por lo tanto, produce una sensación cálida y natural.
- El FC2 está lubricado. Si prefieres, puedes añadir más lubricante a base de agua o aceite en el interior o en el exterior del condón o directamente en el pene. La lubricación facilita la inserción del condón y permite que el pene se mueva libremente durante las relaciones sexuales.
- El FC2 es un producto no alergénico y una excelente opción para hombres y mujeres que tienen alergia al látex.
- El pene no tiene por qué estar erecto para usar el FC2 y no es necesario retirarlo inmediatamente después de la relación sexual.
- Los hombres y las mujeres pueden divertirse juntos insertando el FC2. Además, los dos anillos pueden aumentar el placer durante la relación sexual. Algunos hombres disfrutan al chocar el pene contra el anillo interior, mientras que a las mujeres les puede gustar la sensación del anillo exterior tocando el clítoris.


¿Por qué deberíamos utilizar el FC2?

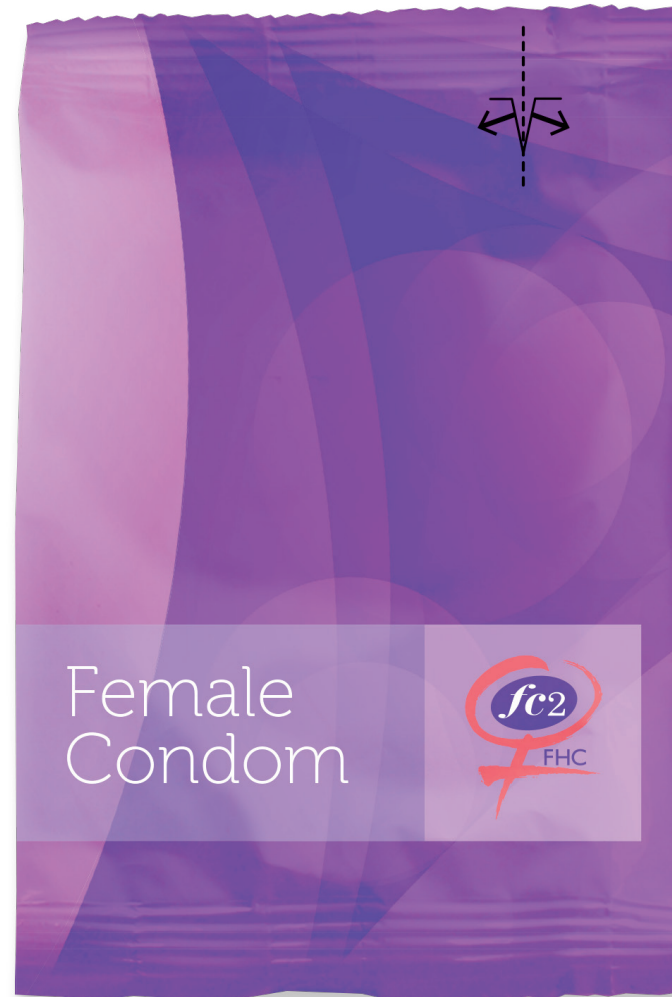

¿Qué es el condón femenino FC2?

- El FC2 es un condón flexible y suave, que se introduce en la vagina y está hecho de un material sintético.
- Es fuerte y transparente, mide 17 centímetros (unas 6,5 pulgadas) de longitud y tiene un anillo interior y otro exterior. El anillo interior es flexible y se encuentra en el extremo cerrado del condón. Este anillo se usa para introducir el FC2 en la vagina y mantenerlo en su sitio durante las relaciones sexuales. El anillo exterior se encuentra en el extremo abierto del condón y queda fuera de la vagina.
- El FC2 reviste la vagina y el cuello del útero. Retiene el esperma después de la eyaculación, con lo cual evita un embarazo no planificado y actúa como una barrera contra virus y bacterias que causan las ITS, incluido el VIH. El FC2 ofrece, también, protección adicional contra las ITS, ya que recubre los órganos sexuales femeninos externos y la base del pene.

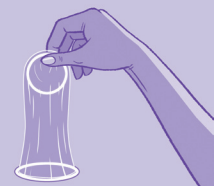

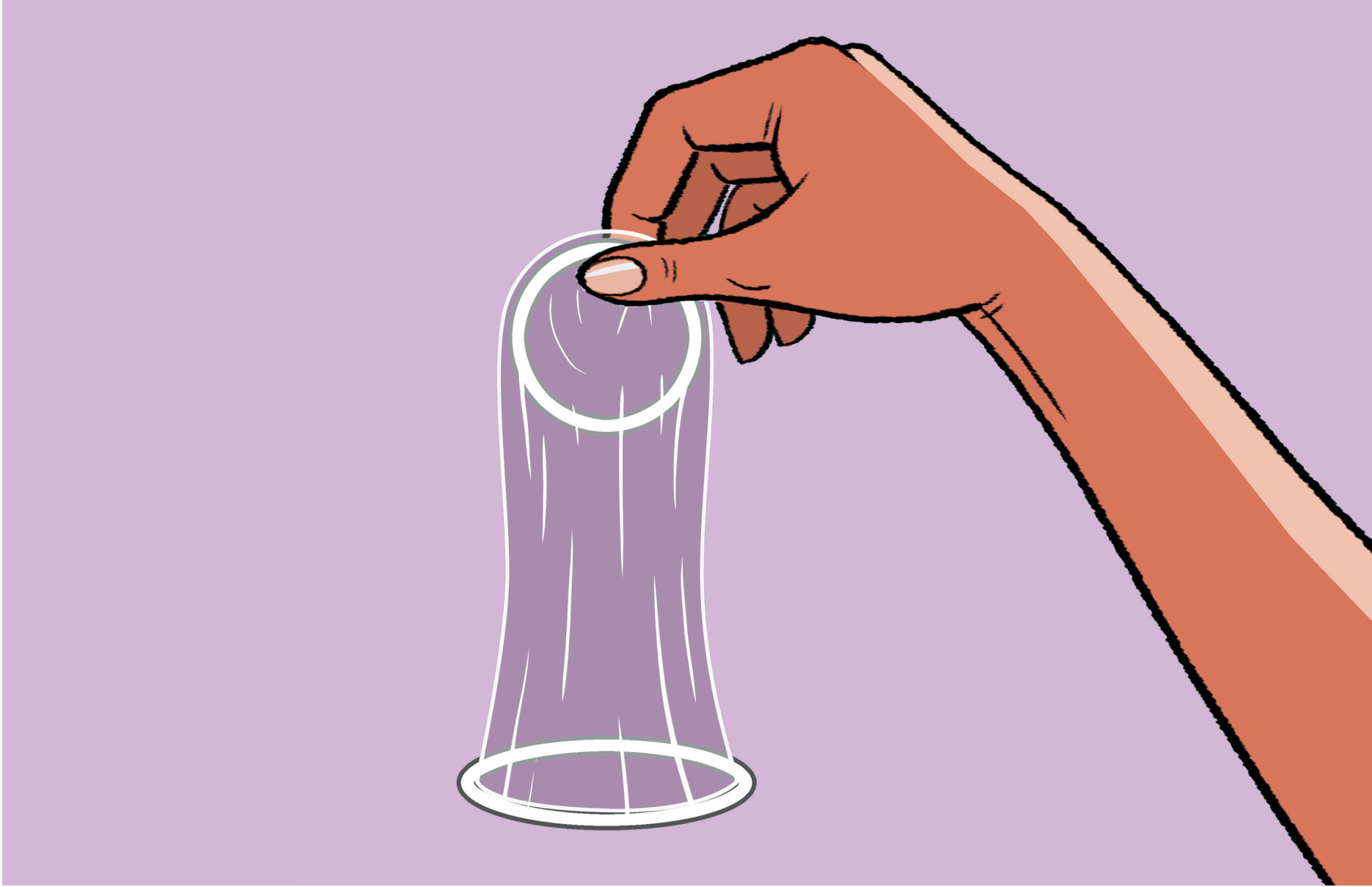

Antes de abrir el FC2


- Verifica la fecha de caducidad, que aparece indicada en la parte frontal o lateral del paquete de FC2.
- Esparce el lubricante en el interior frotando el paquete con las manos.





Abrir el paquete

- Para abrir el paquete, rásgalo empezando desde la flecha situada en el borde y saca el condón.
- No uses tijeras ni cuchillos ni los dientes para abrir el paquete.

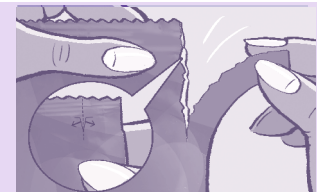



Inserción del FC2


- Agarra el anillo interior entre el pulgar y el índice.
- Luego, aprieta el anillo interior por los lados hasta que se junten y formen una punta.






Inserción del FC2

Puedes insertarte el FC2 de muchas maneras diferentes. Encuentra una posición que te resulte cómoda: de pie, sentada, en cuclillas o acostada.

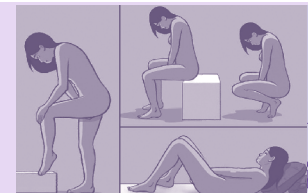


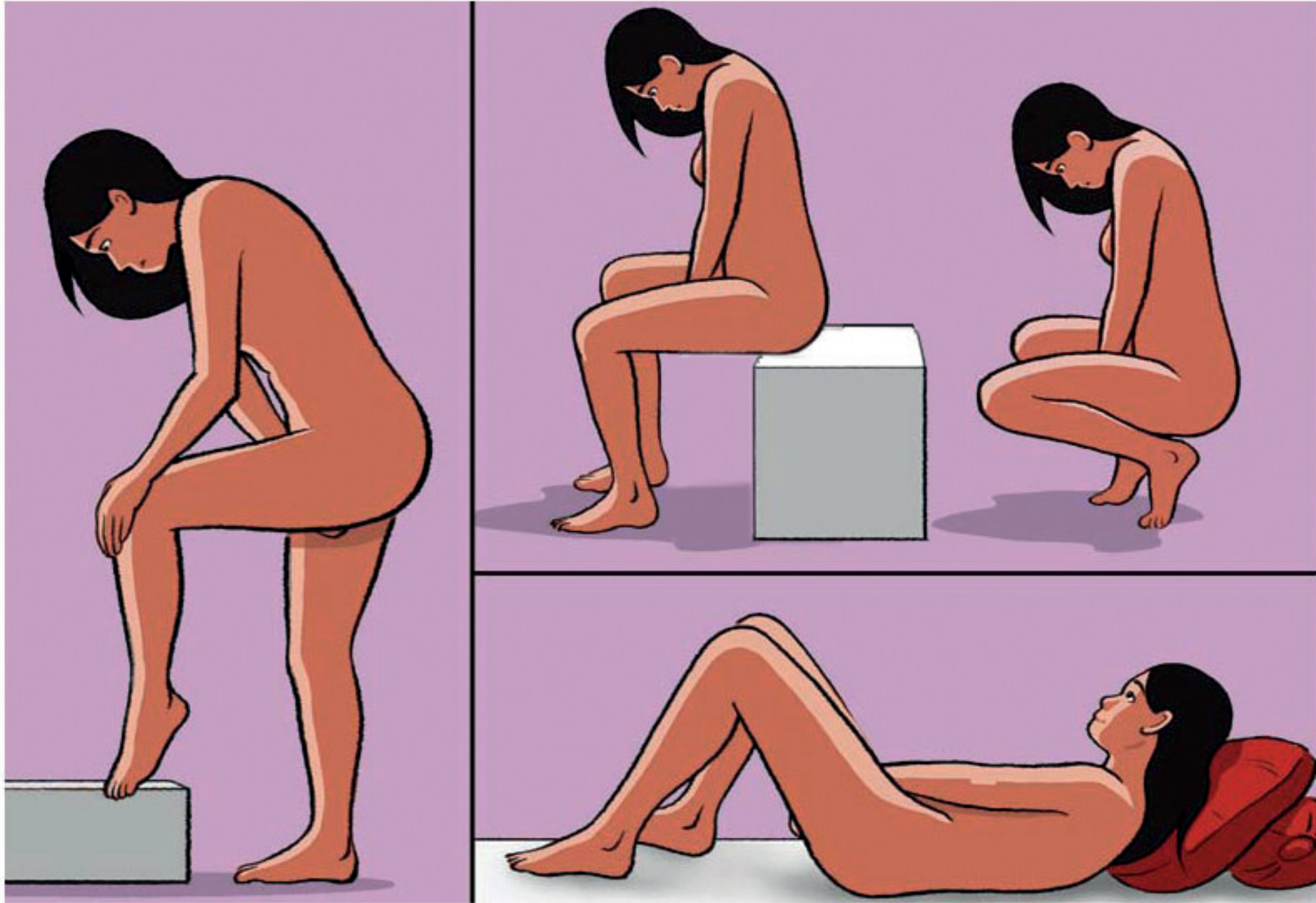

Insertión del FC2


Busca los labios externos de la vagina y sepáralos.





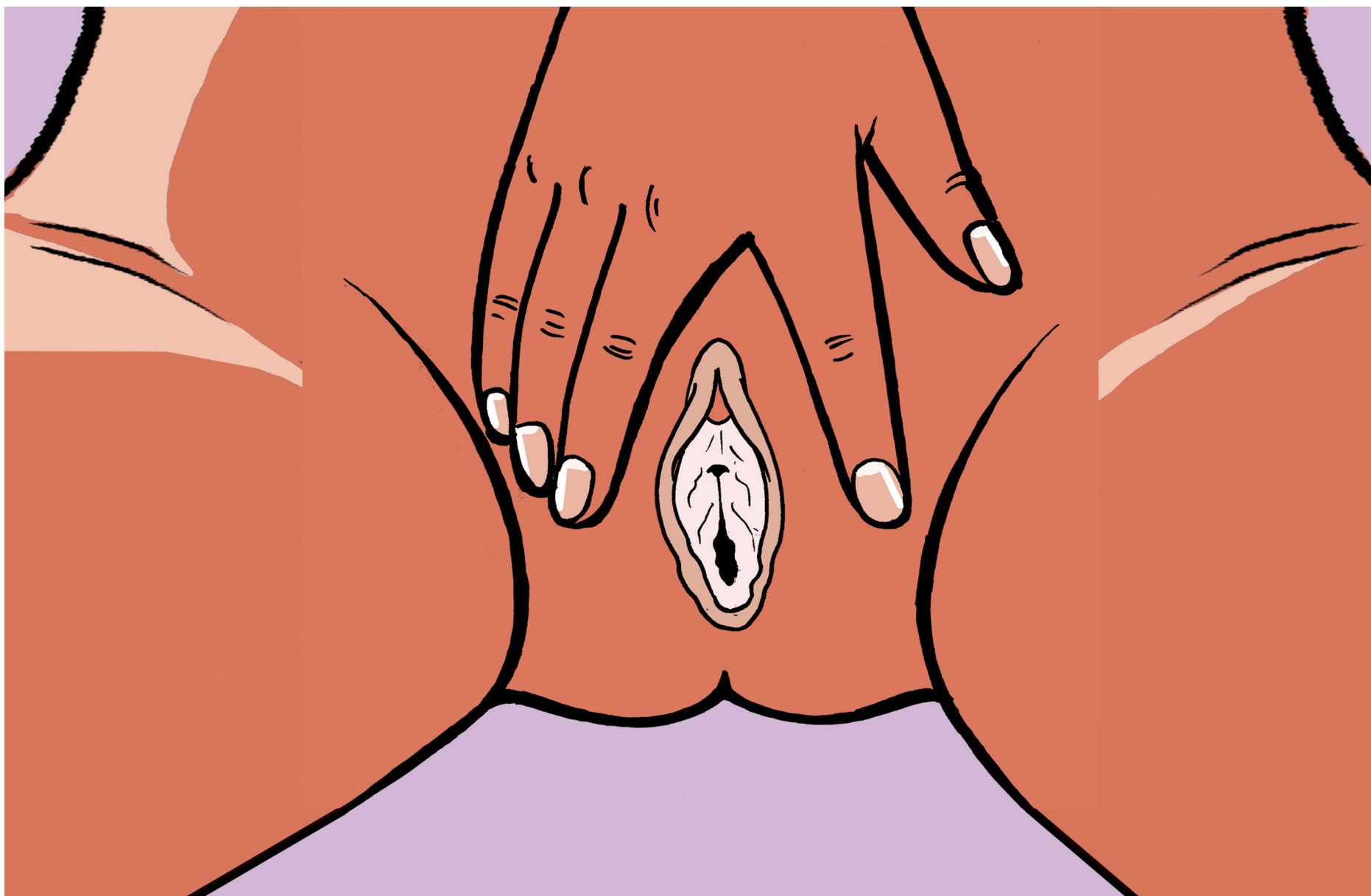

Inserción del FC2

- Usa la punta formada por la unión de los lados del anillo interior para empujar el FC2 dentro de la vagina.
- Desliza el dedo índice o el dedo medio dentro del condón y empuja el anillo interior, que ya está dentro de la vagina, hasta donde sea posible.
- Asegúrate de que el condón no se haya retorcido y que se ajuste perfectamente a la pared de la vagina.

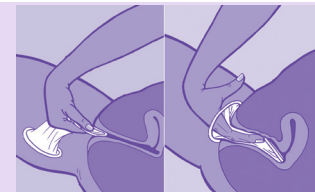

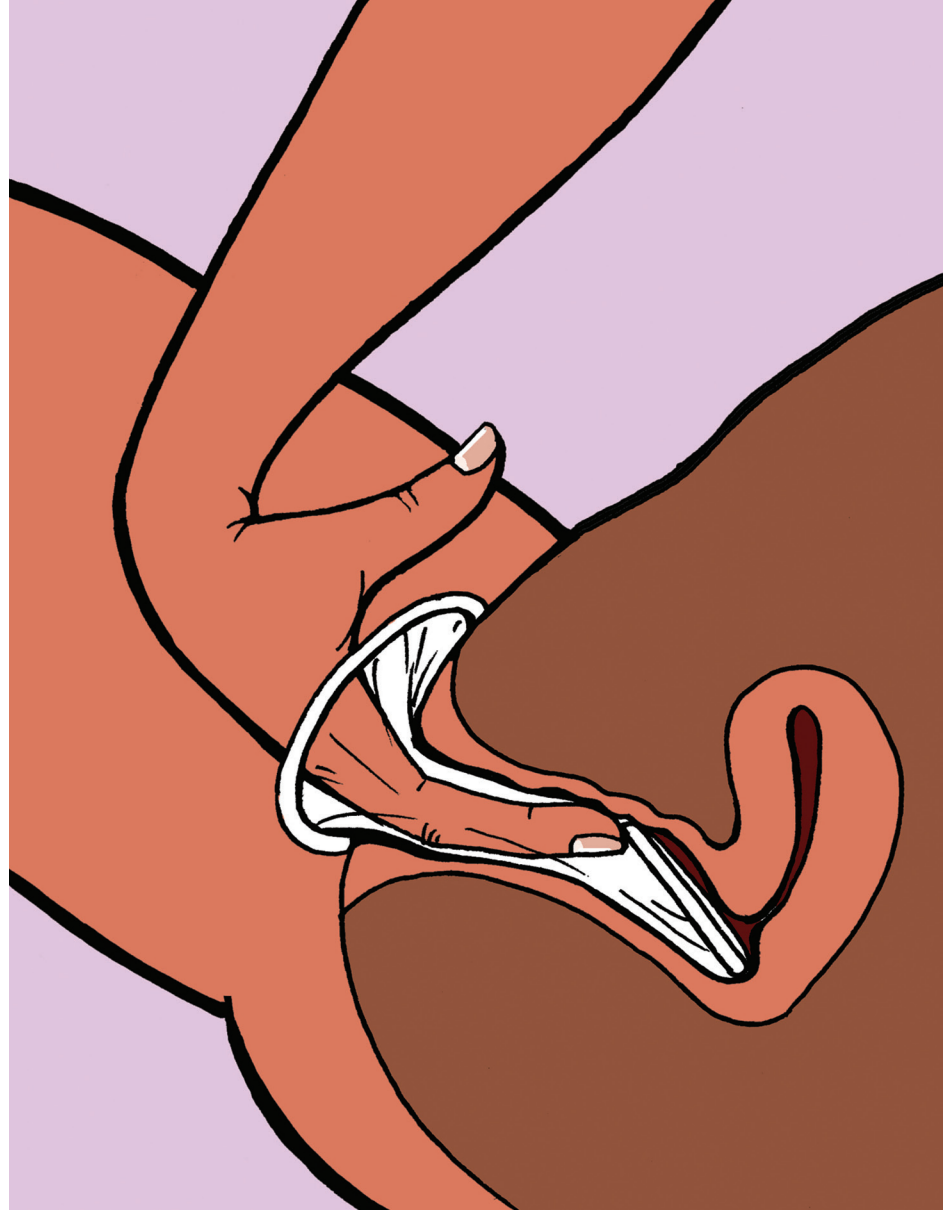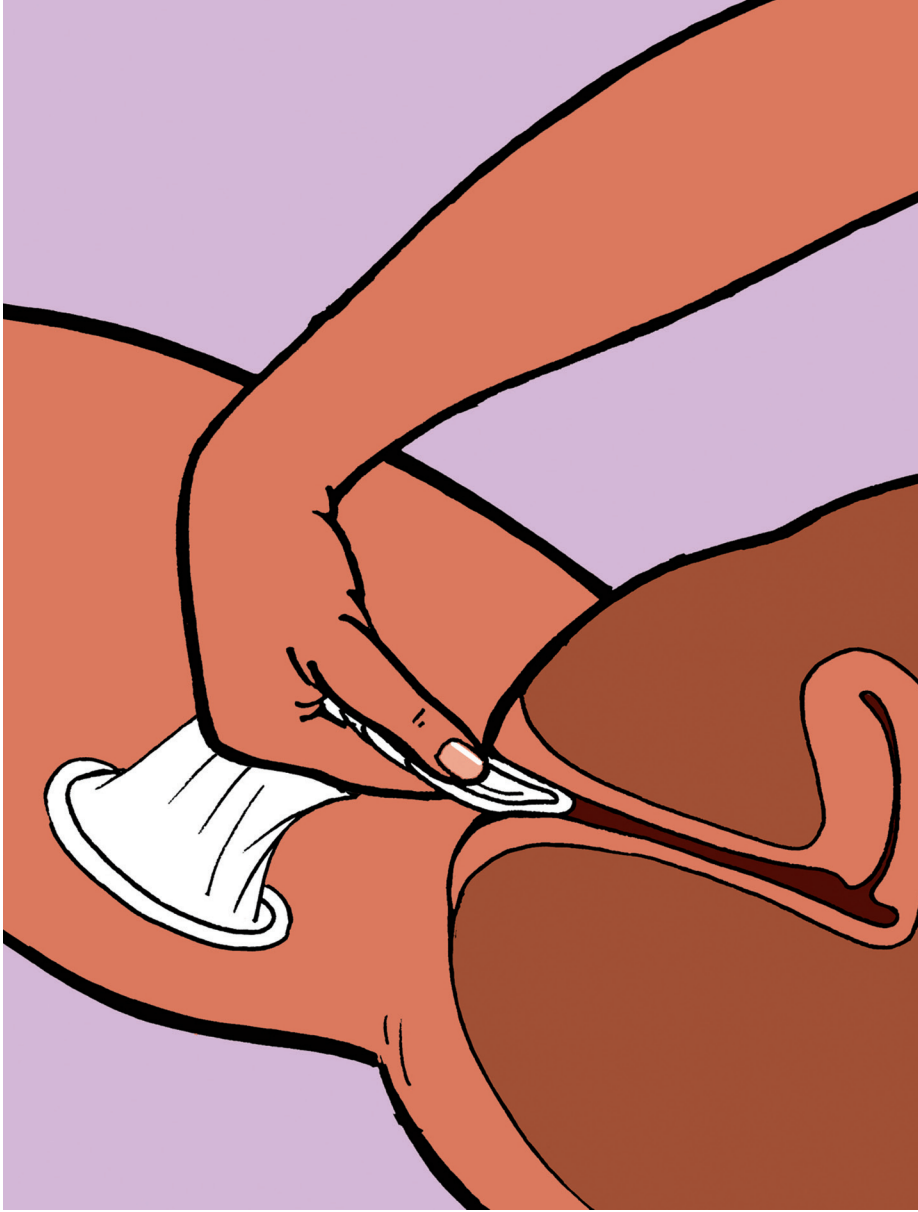

Inserción del FC2


Una pequeña parte del condón, incluido el anillo exterior, permanecerá fuera del cuerpo y te cubrirá los labios de la vagina protegiéndote parcialmente los órganos sexuales externos y recubriendo la base del pene de tu pareja.






Inserción del FC2

El FC2 reviste la parte interior de la vagina y cubre el cuello del útero. La abertura del cuello del útero es tan pequeña que es imposible que el FC2 pase por ese espacio.

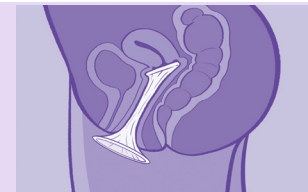

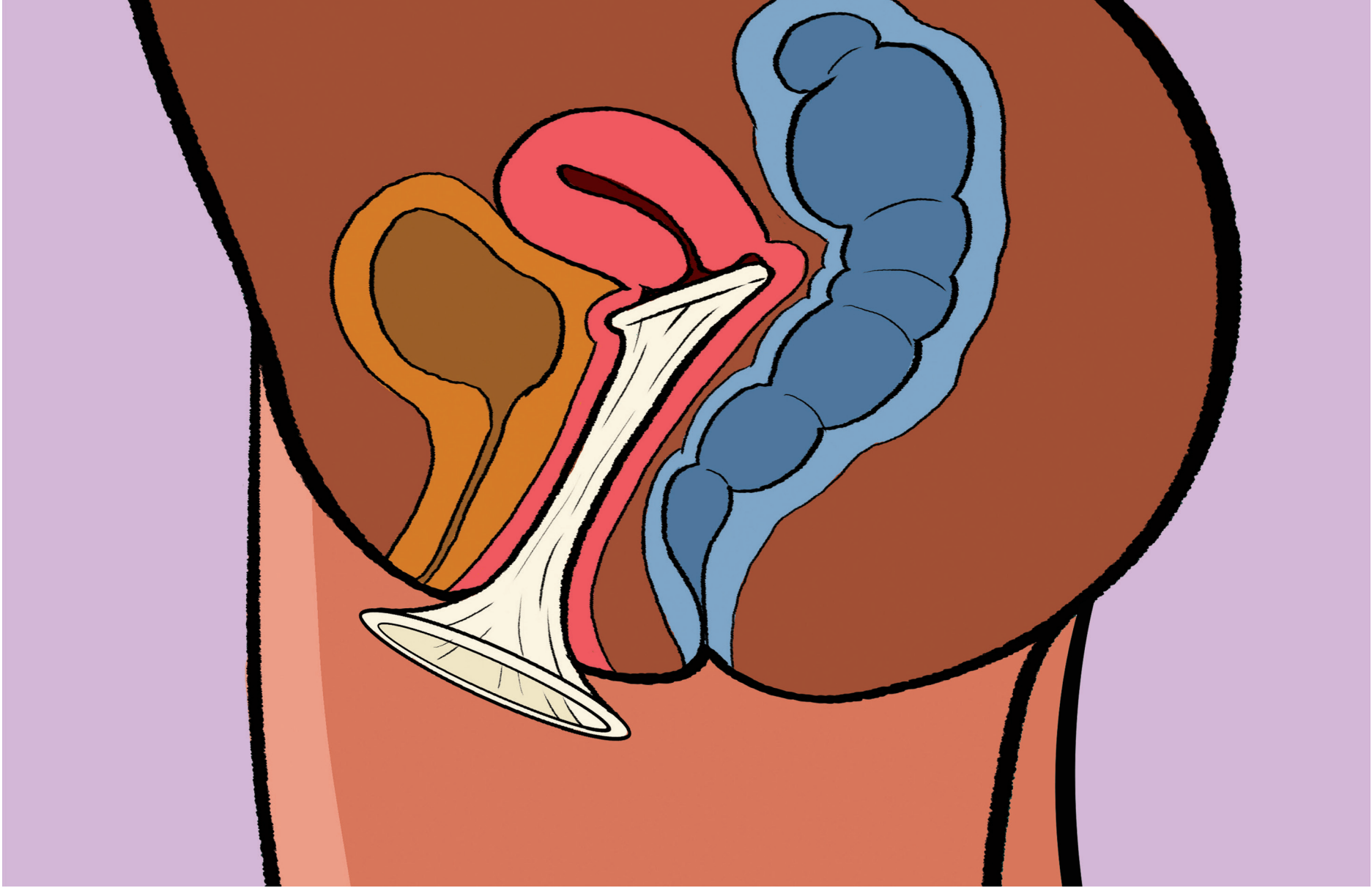

Uso del FC2 durante las relaciones sexuales

- Sujeta bien el anillo exterior y mantenlo en su sitio mientras tu pareja orienta el pene hacia dentro del condón. Una vez que el pene está dentro del condón, no tienes que seguir sosteniendo el anillo exterior.
- Para un mayor placer, puedes añadir más lubricante, ya sea en el interior o en el exterior del condón o directamente en el pene de tu pareja, una vez que ya esté insertado el condón.
- Nunca se debe usar un condón masculino y femenino al mismo tiempo. Usar los dos condones al mismo tiempo no aumenta la protección, pero sí aumenta las posibilidades de que uno o ambos se rompan.







Fallos del FC2

¡Atención!

Tu pareja tendrá que retirar inmediatamente el pene si:

- El pene se desliza entre el condón y la pared de la vagina. En dicho caso, tendrás que volver a posicionar el anillo exterior antes de que tu pareja se disponga de nuevo a deslizar el pene dentro del condón.
- Se ha empujado el anillo exterior hacia el interior de la vagina. En este caso, debes utilizar un FC2 nuevo.




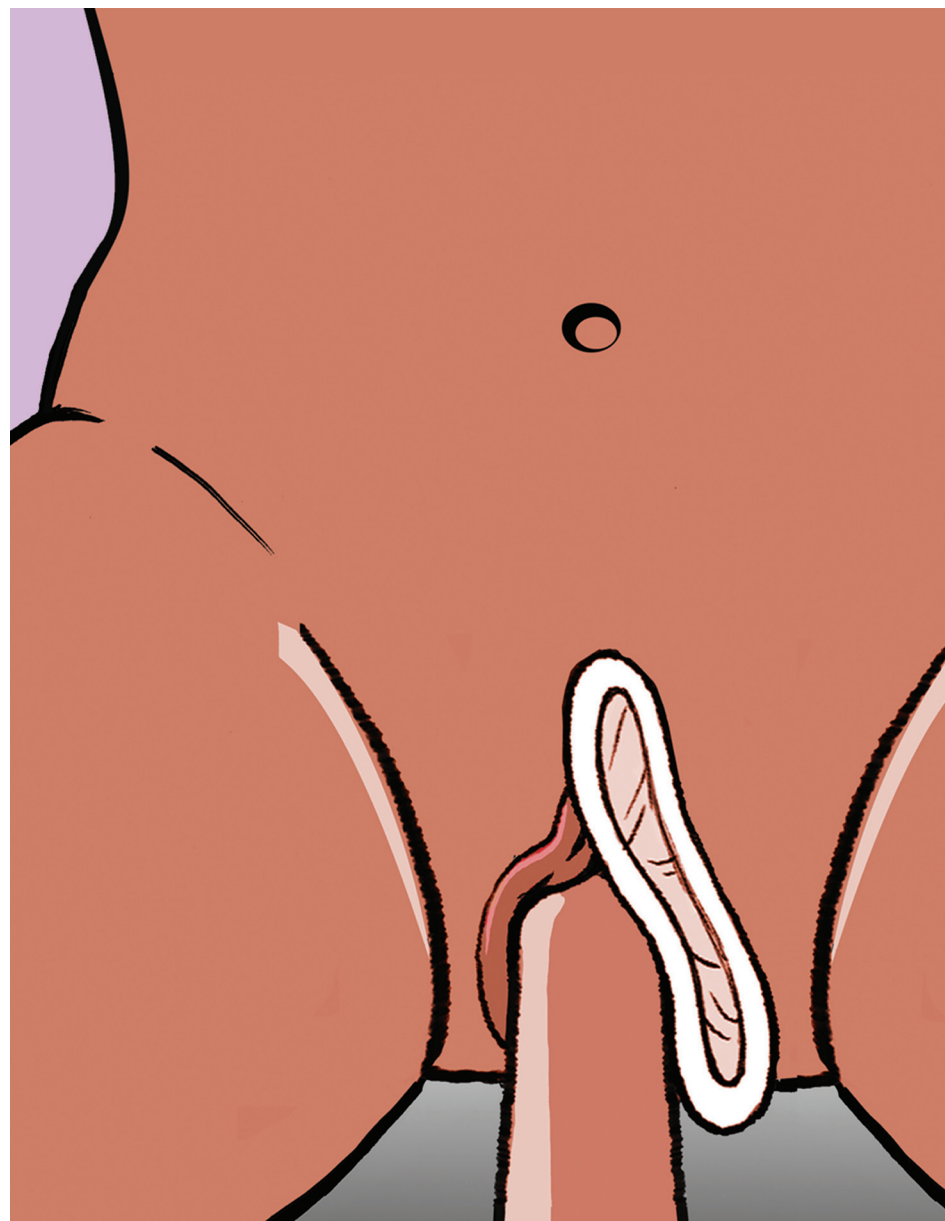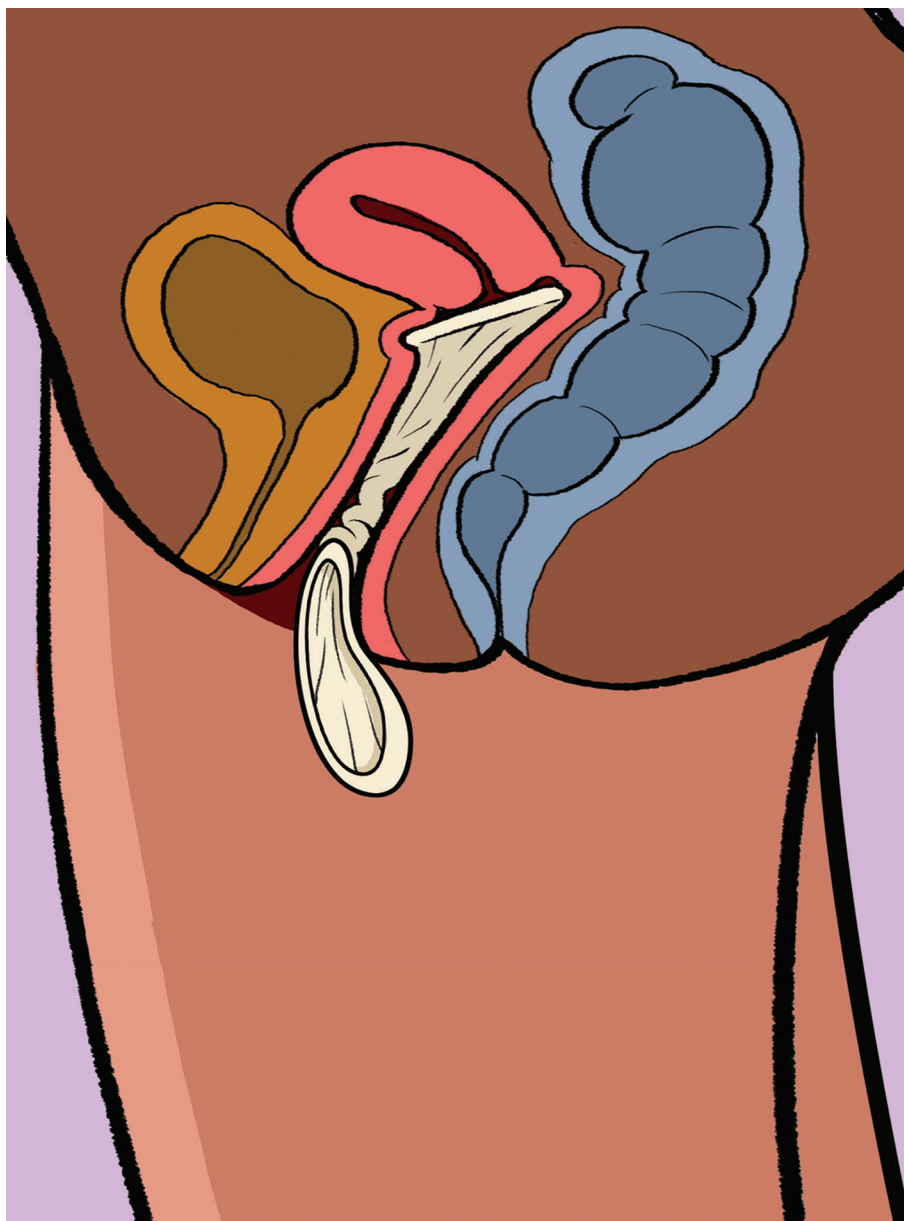

El FC2 después su uso

- Para retirar el FC2, agarra el anillo exterior y retuércelo para mantener el semen dentro del condón. Es mejor hacerlo antes de levantarte. Suavemente, quítate el condón, envuélvelo en un pañuelo de papel o en el paquete vacío y tíralo a la basura.
- Utiliza un FC2 nuevo para cada acto sexual. Nunca reutilices el FC2.



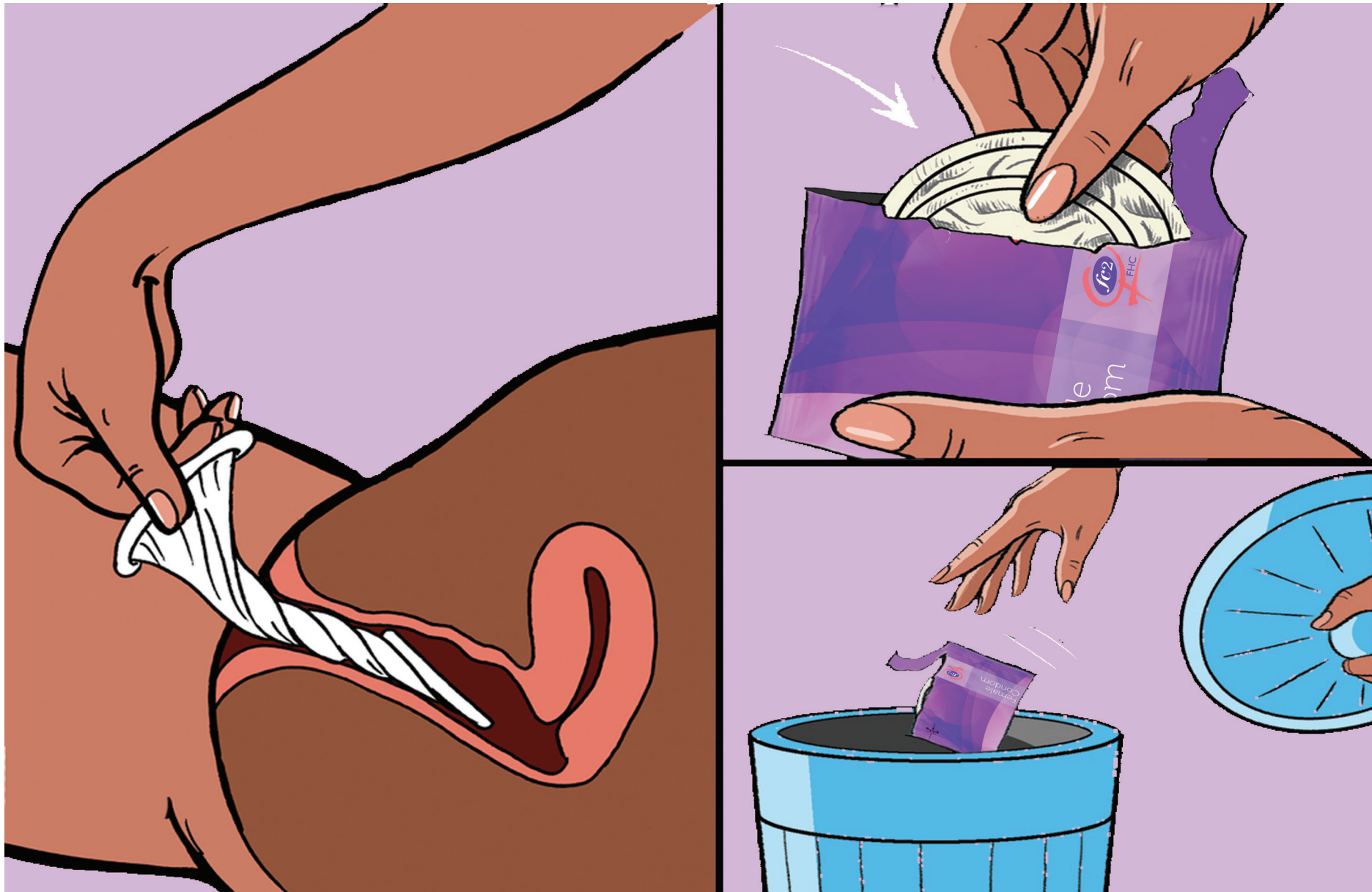

www.fc2femalecondom.com | Para más información, ponerse en contacto con: info@fc2femalecondom.com

 [@FemaleCondomFC2](https://www.facebook.com/FemaleCondomFC2) |  [@FC2FemaleCondom](https://twitter.com/FC2FemaleCondom) |  [FC2FemaleCondom](https://www.youtube.com/FC2FemaleCondom)

The Female Health Company (FHC) fabrica el condón femenino FC2.

Chicago, EE. UU./Londres, Reino Unido/Malasia

