

Vérifiez que
vous disposez de
l'authentique FC2 !



Lorsque vous décidez d'utiliser un préservatif féminin, assurez-vous que vous disposez de l'authentique FC2. Le préservatif féminin FC2 satisfait aux normes de qualité élevées par des organisations sanitaires internationales comme l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et la FDA (Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments). Vous avez la certitude que la pochette contient l'authentique FC2 si vous voyez au moins un des signes suivants sur elle :

- 
- FC2
- The Female Health Company (FHC)

www.fc2femalecondom.com | info@fc2femalecondom.com

 @FemaleCondomFC2
 @FC2FemaleCondom
 FC2FemaleCondom

Le préservatif féminin FC2 est fabriqué par The Female Health Company (FHC).
Chicago (États-Unis)/Londres (Royaume-Uni)/Malaisie



Le préservatif féminin FC2
pour des rapports sexuels
agréables, plus sûrs



Le préservatif féminin FC2 empêche

- les grossesses non désirées
- les infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH

Planifiez-vous une grossesse ? Souhaitez-vous attendre pour avoir votre prochain enfant ? Le préservatif féminin FC2 est une méthode de planification familiale sûre, agréable. Il protège également contre les infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH.



Qu'est-ce que le préservatif féminin FC2 ?

Le préservatif féminin FC2 est un préservatif doux et souple. Il est facile à insérer dans le vagin. Le FC2 a un anneau interne et un anneau externe qui le maintiennent en place pendant le rapport sexuel. Le FC2 s'insère facilement. Il tapisse les parois du vagin, et permet au pénis de bouger librement à l'intérieur du préservatif pendant les rapports sexuels. Le lubrifiant à base de silicone accroît la sensation naturelle.

Le plaisir

Les hommes et les femmes apprécient les rapports sexuels avec le préservatif féminin FC2. Le FC2 a de nombreux avantages :

- Le matériau est doux et souple.
- Le contact est agréable, car le FC2 se réchauffe rapidement à la température du corps.
- Le préservatif féminin ne serre pas le pénis et donne à l'homme une impression de confort.
- Le FC2 peut être inséré quelques heures ou quelques instants avant le rapport sexuel.
- Le FC2 peut être utilisé par les personnes allergiques au latex. Il est fabriqué avec un matériau synthétique appelé nitrile.
- Vous n'avez pas besoin de consulter un médecin avant de commencer à utiliser le préservatif féminin. Le FC2 n'altère pas votre corps, il ne contient pas d'hormones.

La sécurité

De même que le préservatif masculin, le préservatif féminin FC2 bloque le sperme et les bactéries ou virus qui provoquent les IST. L'anneau externe assure une protection supplémentaire contre les IST en recouvrant les organes génitaux féminins externes et la base du pénis. Le FC2 est un préservatif à usage unique.



Emma :

Après des années de contraception hormonale, j'en avais assez des effets secondaires. Avec le FC2, je peux espacer mes grossesses avec confiance. C'est la contraception qui ressemble le plus à la liberté ! Je sens à peine le FC2 et peux marcher facilement quand je le porte.

Santiago :

J'aime le FC2 parce qu'on le sent moins que la plupart des autres contraceptifs. Il se réchauffe à la température du corps, ce qui augmente la sensation pendant le rapport sexuel. L'anneau intérieur est une stimulation supplémentaire pour nous deux, même si ce n'était pas le but !



Olivia :

Mon ami et moi trouvons tous deux la sensation bien meilleure, par comparaison avec le préservatif masculin. De plus, l'insertion du FC2 pendant le rapport ne pose aucun problème. Mon ami aime me voir poser le FC2, c'est sexy !



James :

Le meilleur avantage du FC2 est de maintenir l'intimité avant et après le rapport sexuel. Nous n'avons plus besoin d'interrompre les préliminaires pour poser un préservatif, et mon amie ne doit pas se lever juste après le rapport pour l'enlever.



Sofia :

J'ai une impression de grande sécurité, car je ne dépends pas de l'utilisation d'un préservatif par un homme. J'aime maîtriser ma sexualité. Un autre avantage du FC2 est qu'il couvre davantage la zone génitale et protège donc mieux contre les IST transmises par contact cutané.

