

CONDÓN FEMENINO FC2

¿QUÉ

es el condón femenino FC2?

Es el condón femenino de segunda generación, hecho de nitrilo. Es un condón flexible y suave, que mide unos 17 centímetros (unas 6,5 pulgadas) de longitud y se introduce en la vagina. El FC2 reviste la vagina y el cuello del útero, permitiendo al pene moverse libremente dentro del condón durante las relaciones sexuales.

¿CÓMO

se usa el FC2?

El FC2 tiene un anillo interior y uno exterior. El anillo interior se usa para introducir el FC2 y para mantenerlo en su sitio durante las relaciones sexuales. El anillo exterior se queda fuera de la vagina. Igual que el condón masculino, el FC2 es una barrera contra el espermatozoos después de la eyaculación. La diferencia es que el condón femenino es el único método disponible, controlado por la mujer, de protección contra los embarazos no planificados y las ITS, incluyendo el VIH y el Zika.

¿POR QUÉ

usar el FC2?

El FC2 proporciona a la vez placer y protección contra el embarazo y las ITS. No interfiere con el acto sexual ya que la inserción puede hacerse tanto unas horas antes de mantener relaciones sexuales como justo antes de ellas, y no es necesario quitarlo apenas termine la relación sexual.

● Para todos

- El FC2 sirve para todos, mujeres y hombres, independientemente de su tamaño o forma.
- El FC2 es no alergénico, o sea, es adecuado para hombres y mujeres que tienen alergia o sensibilidad al látex.

● Bajo propio control

- No es necesario consultar al doctor para usar condones femeninos.
- Al contrario que otros métodos contraceptivos, el FC2 no afecta al cuerpo. No es hormonal y, por lo tanto, no tiene efectos secundarios.
- El FC2 proporciona protección extra contra las ITS ya que recubre los órganos sexuales femeninos externos y la base del pene.

● Intensifica el placer

- El FC2 está hecho de nitrilo, lo que significa que –al contrario de los condones de látex– puede usarse en combinación con lubricantes a base de aceites, agua o silicona, sin que ello influya en su fiabilidad.
- El FC2 se calienta hasta la temperatura del cuerpo, facilitando una experiencia sexual cálida y natural.
- El FC2 está lubricado con un lubricante de alta calidad a base de silicona.
- Para algunos usuarios, los dos anillos pueden proporcionar estimulación extra, aumentando el placer durante las relaciones sexuales.

¿CUÁNDO

insertar el FC2?

- El FC2 puede insertarse unas horas antes o justo antes de la relación sexual.
- No es necesario que el pene esté erecto para usar el FC2 y tampoco es necesario retirarlo inmediatamente después de la relación sexual.

¿QUIÉN

puede usar el FC2?


El FC2 puede ser usado por toda mujer u hombre que desee tener sexo seguro.

Además, el FC2 es adecuado para:


- Mujeres que estén menstruando/embarazadas/ (pre o post) menopáusicas.
- Mujeres que recientemente hayan dado a luz/hayan sufrido una histerectomía.
- El FC2 puede usarse con la píldora, inyecciones, dispositivos intrauterinos (DIU), implantes, post esterilización y post vasectomía, para proteger contra las ITS, incluyendo VIH y Zika.



¿CÓMO USAR EL FC2?

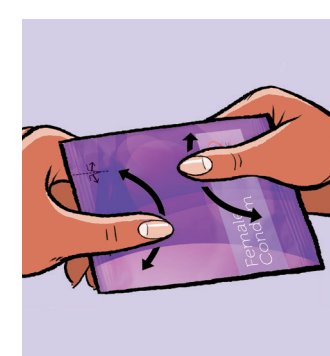


Españe el lubricante

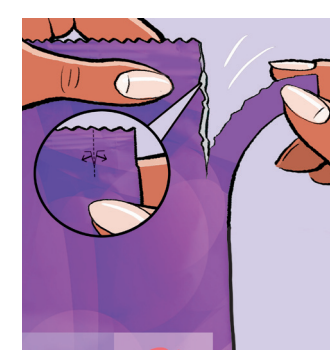


Abra el paquete



Tómelo en las manos y apriete el anillo interior

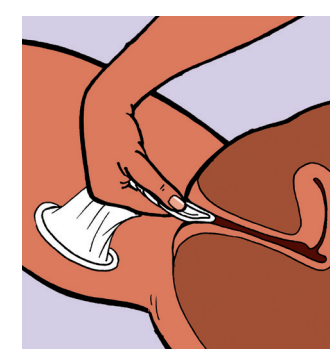

Inserte el condón femenino

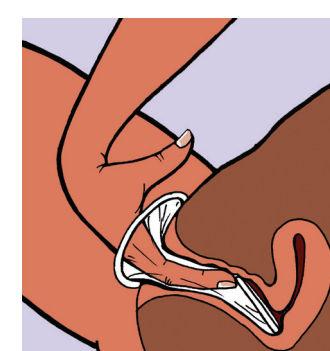

Ahora usted está preparada para tener sexo seguro



¿Quiere saber más?

www.fc2femalecondom.com | info@fc2femalecondom.com |

f @FemaleCondomFC2



@FC2FemaleCondom



FC2FemaleCondom