

CONDÓN FEMENINO FC2

¿QUÉ

es el condón femenino FC2?

Es el condón femenino de segunda generación; es blando, suave, fuerte y seguro; está hecho de nitrilo y se lleva dentro de la vagina. Es una funda transparente de unos 17 centímetros, o unas 6,5 pulgadas de largo, que forra las paredes de la vagina permitiendo al pene moverse libremente dentro del condón durante el sexo.

¿CÓMO

se lleva el FC2?

El FC2 tiene un anillo interno y uno externo. El anillo interno se usa para insertar el FC2 y para mantenerlo en su sitio durante el sexo. El anillo exterior se queda fuera de la vagina. Igual que el condón masculino, el FC2 forma una barrera contra el esperma después de la eyaculación. La diferencia es que el condón femenino es el único método disponible, controlado por la mujer, que protege de las ETS, incluyendo VIH y Zika y de los embarazos no planeados.



ZIKA

y el FC2

- El Zika se puede transmitir al tener sexo sin condón con alguien que esté infectado por el virus.
- Si no quiere quedarse embarazada, es importante protegerse.
- Use un condón tanto para sexo vaginal como oral, del principio al fin.
- Si usted ya está embarazada, la protección sigue siendo importante. El virus del Zika puede ser transmitido de la mujer embarazada a su feto. La infección por Zika durante el embarazo puede causar el defecto de nacimiento llamado microcefalia y otros problemas cerebrales graves en el feto. ¡Su bebé merece protección!
- El FC2 le da el control completo sobre su protección. Es un método de protección que empodera a las mujeres y las protege doblemente.

¿PORQUÉ

usar el FC2?

El FC2 proporciona a la vez placer y protección contra el embarazo y las ETS. No interfiere en el acto sexual ya que la inserción puede hacerse con anterioridad a él y la eliminación se puede posponer hasta después del sexo.

● Para todos

- El FC2 sirve para todos, mujeres y hombres, independientemente de su tamaño o forma.
- El FC2 es no alergénico, es adecuado para hombres y mujeres que tienen alergia, o sensibilidad, al látex.

● Bajo propio control

- No es necesario consultar al doctor para usar condones femeninos.
- Al contrario que otros métodos contraceptivos, el FC2 no afecta al cuerpo. No es hormonal y, por tanto, no tiene efectos secundarios.
- El FC2 proporciona protección extra contra las ETS al cubrir los órganos sexuales externos de la mujer y la base del pene.

● Intensifica el placer

- El FC2 está hecho de nitrilo, lo que significa que –al contrario de los condones de látex– puede usarse en combinación con lubricantes a base de aceites, agua o silicona, sin que ello influya en su fiabilidad.
- El FC2 se calienta hasta la temperatura del cuerpo, facilitando una experiencia sexual cálida y natural.
- El FC2 está lubricado con un lubricante de alta calidad a base de silicona.
- Para algunos usuarios, los dos anillos pueden proporcionar estimulación extra, aumentando el placer durante el sexo.

¿CUÁNDO

insertar el FC2?

- El FC2 puede insertarse unas horas antes, o justo antes, del sexo.
- No es necesario que el pene esté erecto para usar el FC2, y tampoco es necesario retirarlo inmediatamente después del sexo.

¿QUIÉN

puede usar el FC2?

El FC2 puede ser usado por toda mujer u hombre que desee tener sexo seguro. Además, el FC2 es adecuado para:

- Mujeres que están menstruando/embarazadas/ (pre o post) menopáusicas.
- Mujeres que recientemente han dado a luz/han sufrido una histerectomía.
- El FC2 puede usarse con la píldora, inyecciones, dispositivos intrauterinos (DIU), implantes, post esterilización y post vasectomía, para proteger contra las ETS, incluyendo VIH y Zika.

¿Quiere saber más?

www.fc2femalecondom.com | info@fc2femalecondom.com |

f @FemaleCondomFC2

| t @FC2FemaleCondom

| v FC2FemaleCondom

¿CÓMO USAR EL FC2?




Extienda el lubricante





Abra el paquete



Tómelo en las manos y apriete el anillo interno

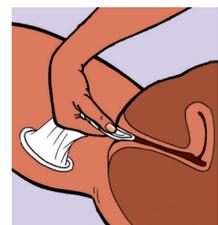

Inserte el condón femenino

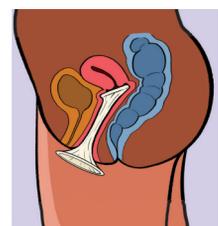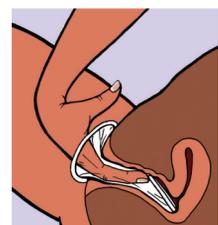

Ahora usted está preparada para tener sexo seguro

