

LE PRÉSERVATIF FÉMININ FC2

QUOI

qu'est-ce que le préservatif féminin FC2?

Le FC2, préservatif féminin de la deuxième génération, est doux, souple, résistant et sûr. Fabriqué en nitrile, il se porte à l'intérieur du vagin. C'est une gaine transparente d'environ 17 centimètres ou 6,5 pouces de long qui tapisse les parois du vagin. Il permet au pénis de bouger librement à l'intérieur du préservatif pendant le rapport sexuel.

COMMENT

porter le FC2?

Le FC2 a un anneau interne et un anneau externe. L'anneau interne sert à insérer le FC2 dans le vagin et à maintenir le préservatif en place pendant le rapport sexuel. L'anneau externe reste à l'extérieur du vagin. Tout comme un préservatif masculin, le FC2 empêche le passage du sperme après l'éjaculation. La différence est que le préservatif féminin est la seule méthode contrôlée par les femmes pour se protéger contre la grossesse non désirée et les IST, y compris le VIH et le virus Zika.

POURQUOI

utiliser le FC2?

Le FC2 peut donner du plaisir tout en protégeant contre la grossesse et les IST. Il n'interrompt pas l'acte sexuel, car il peut être inséré à l'avance et l'enlèvement peut être reporté jusqu'après le rapport sexuel.

● Convient à tous

- Le FC2 convient à toutes les femmes et tous les hommes, quelle que soit leur taille ou leur morphologie.
- Le FC2 est anallergique : il convient aux femmes et aux hommes allergiques ou sensibles au latex.

● Contrôle assuré

- Vous n'avez pas besoin d'aller chez un docteur avant de commencer à utiliser des préservatifs féminins.
- Contrairement à d'autres contraceptifs, le FC2 n'affecte pas votre corps. Il est non hormonal et n'a donc pas d'effets secondaires.
- Le FC2 réalise une protection supplémentaire contre les IST en recouvrant les organes génitaux externes de la femme et la base du pénis.

● Augmentation du plaisir

- Le FC2 est fabriqué en nitrile. Il peut donc être utilisé – contrairement aux préservatifs en latex – en combinaison avec les lubrifiants à base d'huile, d'eau ou de silicone, sans affecter la sécurité.
- Le FC2 se réchauffe à la température corporelle et rend l'acte sexuel agréable et naturel.
- Le FC2 est lubrifié avec un lubrifiant de qualité supérieure à base de silicone.
- Pour certains utilisateurs, les deux anneaux peuvent être une stimulation supplémentaire et augmenter le plaisir pendant le rapport sexuel.

QUAND

insérer le FC2?

- Le FC2 peut être inséré quelques heures ou juste avant le rapport sexuel.
- Le pénis ne doit pas être en érection pour utiliser le FC2 et ne doit pas être retiré immédiatement après le rapport sexuel.

QUI

peut utiliser le FC2?

Le FC2 peut être utilisé par chaque femme ou homme qui souhaite avoir un rapport sexuel en toute sécurité.

De plus, le FC2 est approprié pour :

- Les femmes qui ont leurs menstruations/sont enceintes/sont en préménopause, ménopause ou postménopause
- Les femmes qui ont récemment accouché/ont eu une hystérectomie.
- Le FC2 peut être utilisé conjointement avec la pilule contraceptive, les injections, les dispositifs intra-utérins (DIU), les implants, après la stérilisation et après la vasectomie pour se protéger contre les IST, y compris le VIH et le virus Zika.

Voulez-vous en savoir plus?

www.fc2femalecondom.com | info@fc2femalecondom.com |

f @FemaleCondomFC2 | @FC2FemaleCondom | FC2FemaleCondom



COMMENT UTILISER LE FC2?




Appliquez le lubrifiant.





Ouvrez la pochette.



Tenez l'anneau intérieur et compressez-le.

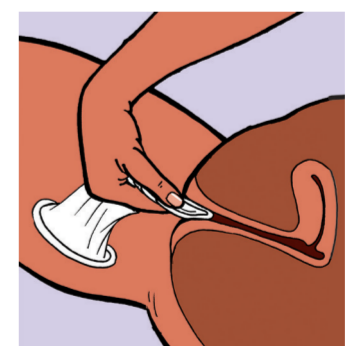

Insérez le préservatif féminin.

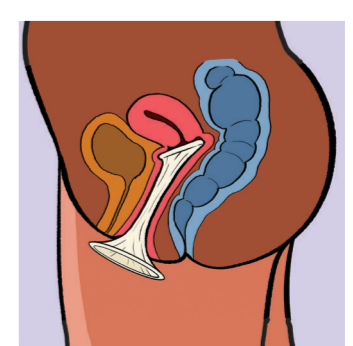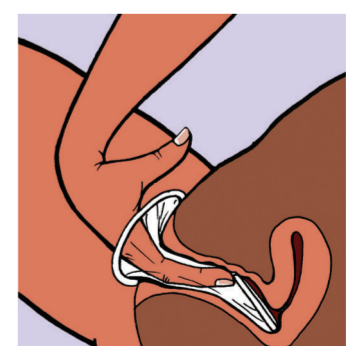

Vous êtes prêts pour avoir un rapport sexuel sûr.

